

Ohje kiskoleikkurin käyttöön

CleanSide-verhoja asennettaessa

Näiden ohjeiden avulla verhokiskoihin saadaan leikattua tarvittavat aukot CleanSiden antibakteeristen väliverhojen asentamisen helpottamiseksi. Kiskoon leikataan aukko jompaan kumpaankin päähän, josta vanhat verhot saadaan helposti poistettua ja uudet pujotettua tilalle.




1. Työnnä leikkurin pää haluttuun kohtaan verhokiskon päässä.



2. Paina sinisiä käsiosia yhteen, jolloin työkalu leikkaa kiskosta palan. Tarvittaessa toista käsittelyä, kunnes aukko on halutun kokoinen.




3. Toista käsittely molemmille puolille kiskon uraa.

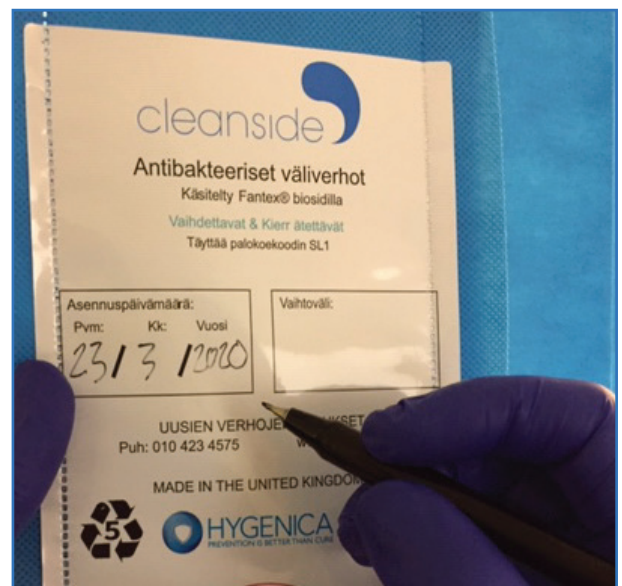

4. Merkitse verhoihin päivämäärä vaihtovälin muistamiseksi.



5. Pujota verho kiskoon.

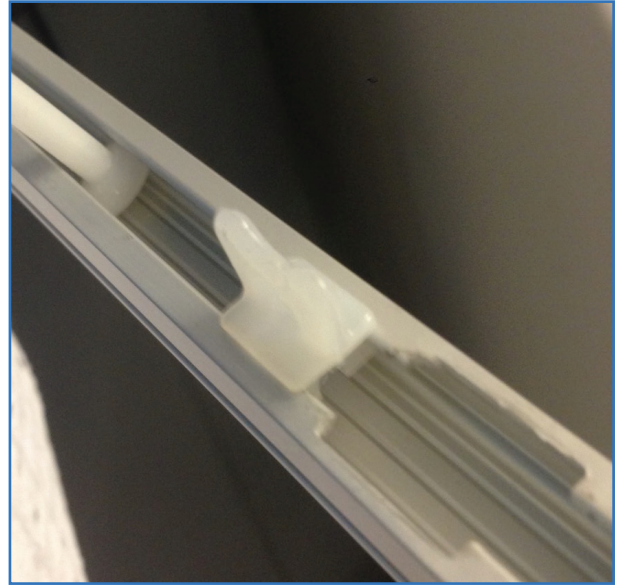

6. Aseta aukon eteen kiskoihin sopiva stoppari (tai tilapäisesti esim. teippiä). Tämä estää verhon liukumisen pois kiskoista.

Asiakaspalvelumme auttaa kaikissa antibakteerisiin väliverhoihin liittyvissä kysymyksissä - ota yhteyttä



Palautathan leikkurin ystävällisesti lähetyksen mukana tulleella Postin palautustarralla, tai pyydä asiakaspalveluamme lähettämään osoitetarra palautusta varten.

Asiakaspalvelumme auttaa kaikissa verhoihin ja niiden asennukseen liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä!

CleanSide Sairaalahygienia
Asiakaspalvelu ma-pe klo 8-16
p. 010 423 4575
tuotetilaukset@cleanside.fi

Postitusosoite:
Teerisuonkuja 1b
00700 Helsinki