

Menettely käsidesinfektioaineen oikeaoppisen käytön koulutuksessa:

- 1) Kaada UV-konsentraatti (10ml) mihin tahansa 500ml:n käsidesipulloon ja ravista kunnolla.
- 2) Annostele 2 pumppausta UV-käsidesiä käsiisi ja levitä se tasaisesti kämmeniin ja sormiin, käyttäen oikeita menetelmiä.
- 3) Aseta kädet UV-valon alle nähdäksesi, miten hyvin olet onnistunut desinfioimaan kätesi. Desinfioituneet kohdat loistavat UV-valossa, likaiset eivät.
- 4) Käyttäkää hygieniavastaavan kanssa hyväksi käsihygienian pisteytystaulukkoa (ladattavissa sivuiltamme pdf-tiedostona), selvittäessänne onnistumistasi.
- 5) Hygieniavastaava opettaa oikean käsien desinfiointimenetelmän, jonka jälkeen toistakaa menettely ja tarkastakaa tulos uudestaan.



UV-valo paljastaa käsistä desinfioituneet kohdat