


SANIPULL HYGIEENISET HOITAJAKUTSUVETONARUT

1. Solmi vanhaan hoitajakutsuvetonaruun 8-solmu (tai vastaava) kuvan osoittamalla tavalla n. 20-25 cm yläpäästä.

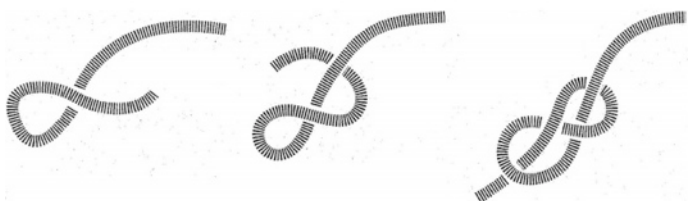

2. Leikkaa vanha naru poikki solmun alapuolelta. Tarkkaile, että solmusta tulee riittävän iso, jottei se pääse liukumaan kiinnitysadapterin hahlon läpi liian helposti.



3. Aseta vanha narunpätkä solmuineen Sanipull kiinnitysadapterin keskelle hahloon kuvan osoittamalla tavalla.



4. Napsauta kiinnitysadapteri kiinni ja tarkkaile, että naru jää sisälle asianmukaisesti paikoilleen hahloon. Kun adapterin sulkeutuessa kuuluu napsahdusääni, on naru oikeassa asennossa.



5. Asennus valmis, uusi hygieeninen Sanipull hoitajakutsuvetonaru valmis käytettäväksi.