


CleanSiden antibakteeristen väliverhojen asennusohje

Näiden ohjeiden avulla saat asennettua CleanSiden antibakteeriset väliverhot helposti ja nopeasti.



1. Irroita verhokiskon toisesta päädyistä stoppari tai päätytulppa. Molemmista päistä seinään asennetuissa verhokiskoissa kiskoon leikataan asennusaukko. Kysy tällöin lisää asiakaspalvelustamme!

2. Poista kiskosta vanhat verhot sekä mahdolliset kangasverhojen kiinnitysliu'ut.

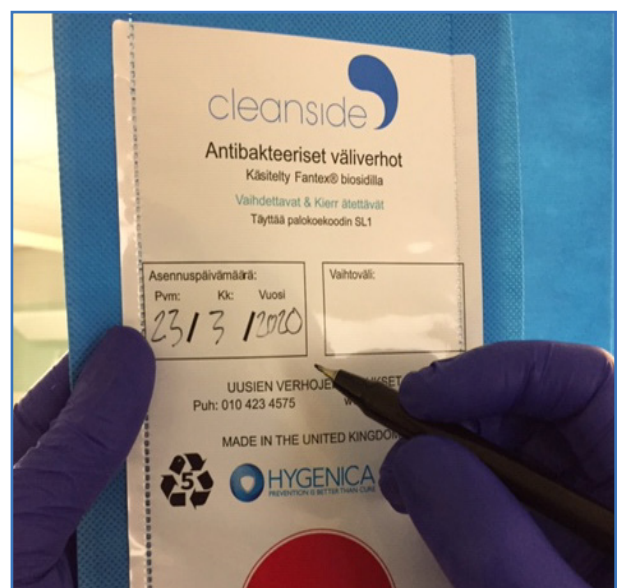


3. Liukasta CleanSide väliverhojen verhotappeja silikoniliinoilla. Voit tarvittaessa liukastaa myös verhokiskon uran liinalla.

4. Merkitse verhoon asennuspäivä esim. permanent-tussilla.



5. Pujota sopiva määrä verhoja kiskoon tappi kerrallaan kiskon päädyistä / asennusaukosta. Poista kustakin verhosta muovinen suojakääre.

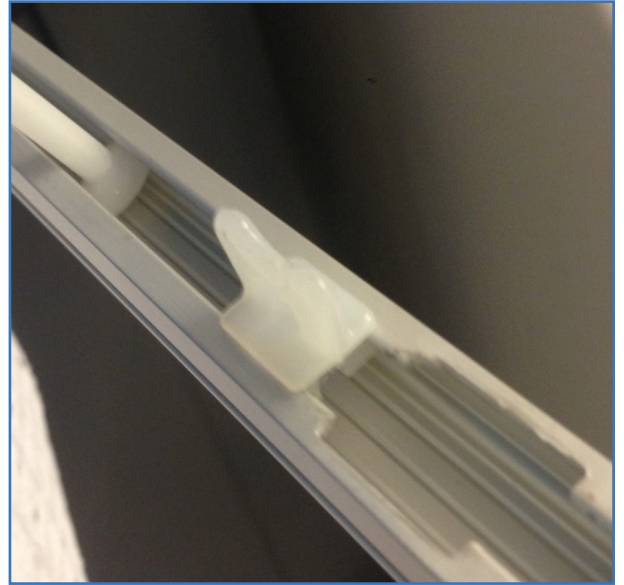

6. Kun verhot pujotettu kiskoon, kiinnitä stoppari (tai vastaava) paikalleen. Testaa verhojen liukuvuus ja liukasta tarvittaessa silikoniliinoilla.

Asiakaspalvelumme auttaa kaikissa antibakteerisiin väliverhoihin liittyvissä kysymyksissä - ota yhteyttä



CleanSide Sairaalahygienia
Asiakaspalvelu ma-pe klo 8-16
p. 010 423 4575
tuotetilaukset@cleanside.fi

Postiosoite:
Teerisuonkuja 1b
00700 Helsinki