


CleanSiden antibakteeristen väliverhojen asennusohje

Näiden ohjeiden avulla saat asennettua CleanSiden antibakteeriset väliverhot helposti ja nopeasti.




1. Irrota verhokiskon toisesta päädyistä stoppari tai päätytulppa. Seinästä seinään asennetuissa verhokiskoissa kiskoon voidaan leikata asennusaukko CleanSiden kiskoleikkurilla. Kysy lisää asiakaspalvelustamme!

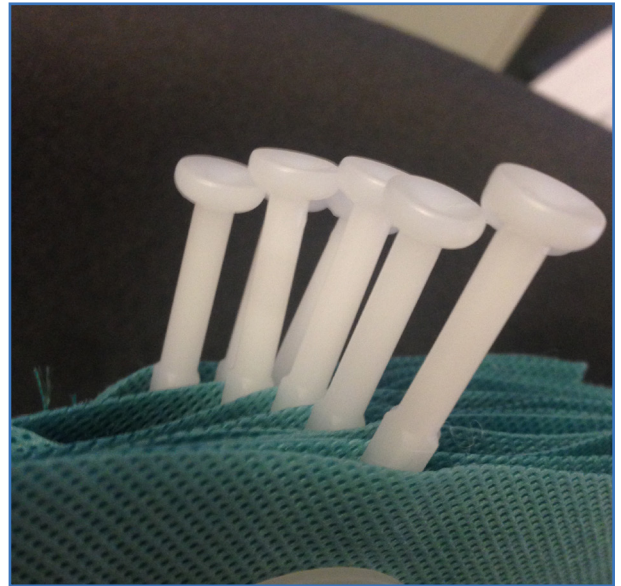

2. Poista kiskosta käytetyt verhot sekä kaikki vanhat verhokiinnikkeet.




3. Liukasta CleanSide väliverhojen verhotappeja silikoniliinoilla. Voit tarvittaessa liukastaa myös verhokiskon uran.

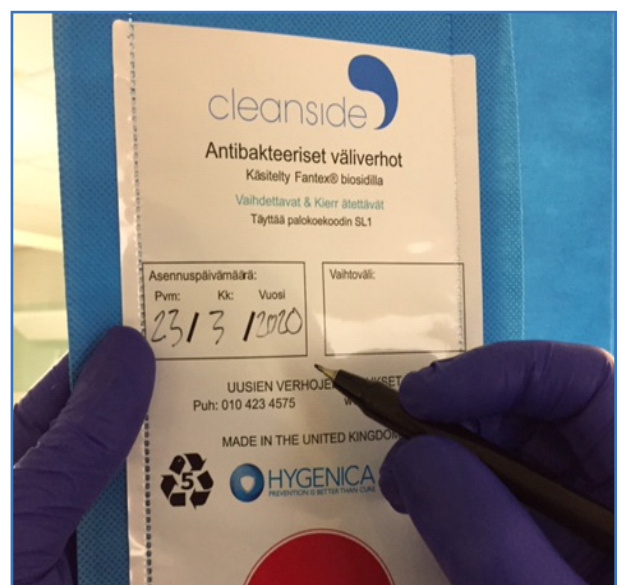

4. Merkitse verhoon asennuspäivä esim. permanent-tussilla. Seuraava vaihtopäivä on näin helpompi laskea.



5. Pujota sopiva määrä verhoja kiskoon tappi kerrallaan kiskon päädyistä tai asennusaukosta. Poista kustakin verhosta muovinen suojakääre.

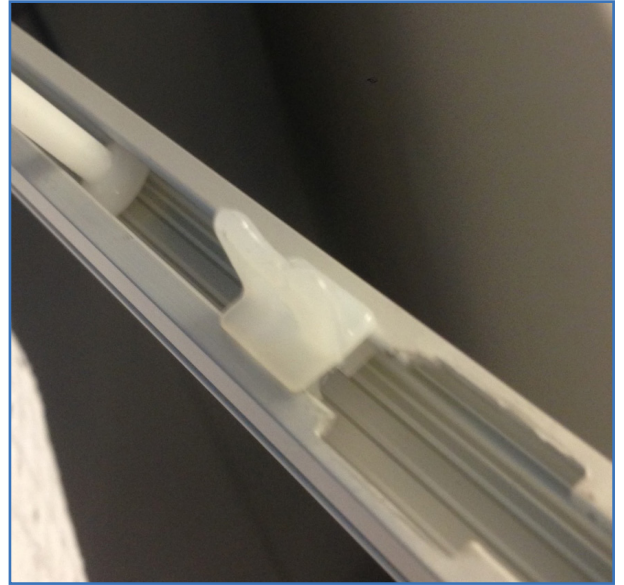

6. Kun verhot on pujotettu kiskoon, kiinnitä stoppari (tai vastaava) paikalleen. Testaa verhojen liukuvuus ja liukasta tarvittaessa vielä silikoniliinoilla.

Asiakaspalvelumme auttaa kaikissa antibakteerisiin väliverhoihin liittyvissä kysymyksissä - ota yhteyttä



CleanSide Sairaalahygienia
Asiakaspalvelu ma-pe klo 8-16
p. 010 423 4575
tuotetilaukset@cleanside.fi