



Oxivir Excel® Wipe

Pesevä desinfektiopyyhe myös lääkinnällisille laitteille

Kuvaus tuotteesta

Oxivir Excel Wipe –pyyhe on kehitetty laajakirjoiseen, yksivaiheiseen desinfiivaan puhdistukseen. Tuotteen vaikutusaika on lyhyt ja sen teho perustuu patentoituun AHP-tekniikkaan (Accelerated Hydrogen Peroxide). Tuote soveltuu vettäasetäville kovalle pinoille sekä ei-invasiivisille lääkinnällisille laitteille (CEIIa).

Ominaisuudet

- Tehoa bakteereihin, viruksiin ja hiivoihin. Desinfioi jopa 1 minuutissa. Turvallinen käyttäjälle ja pinoille. Käyttövalmis ja helppokäyttöinen. Hyvä pesuteho. Hajusteeton. Aktiiviatteet hajoavat vedeksi ja hapeksi. Ei vaadi huuhtelua, kerrostumatonta.

Edut

- Tuotteen teho on todistettu kattavasti EN-testein. Tehoa useisiin patogeeneihin mm. polio-, adeno- ja murine noro -viruksiin. Tehoa myös kaikkiin vaipallisiin viruksiin, kuten HI-, HB-, HC-, influenssa-, vaccinia- ja corona -viruksiin. Desinfektion toteutumiseen vaadittavat kontaktiajat ovat tällä tuotteella lyhyitä, näin desinfektio ehtii toteutua ennen pinnan kuivumista. Erinomainen puhdistuskyky. Turvallinen käyttää. Ei ärsytä silmiä eikä ihoa. AHP-koostumus on turvallinen pinoille. Soveltuu käytettäväksi myös terveydenhuollon korkean riskin kohteissa mukaan lukien leikkaussalit, teho-osastot ja potilashuoneet.

Käyttöohje

Poista näkyvä lika. Avaa pyyhepakkaus, ota pakkauksesta yksi pyyhe ja sulje kansi. Pyyhi pinta ja anna kuivua. Ota uusi pyyhe, kun käytössä oleva pyyhe ei kostuta pintaa riittävästi, kun pinta on silminnähdn likainen tai kun siirryt seuraavaan puhdistuskohteeseen.

Tekniset tiedot

Ulkonäkö: valkoinen, polypropyleenistä valmistettu kertakäyttöpyyhe

Tuoksu: hajusteeton

pH-arvo (käyttövalmis): < 2.0


Suhteellinen tiheys (20°C): ≈1.0001

Säilyvyys: 2 vuotta avaamattomana, 28 vrk avattuna

Yllä olevat tiedot ovat tyyppillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelyyn ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna. Reagoi hapettuvien tuotteiden kanssa.

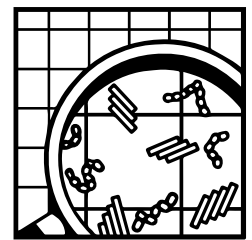

© A.I.S.E.

Tärkeää: Älä käytä muiden kemikaalien kanssa. Ei saa käyttää pinoille, jotka eivät siedä vettä tai happoa. Käytä suojakäsineitä!



Oxivir Excel® Wipe

Yhteensopivuus

Oxivir Excel Wipe –pyyhe soveltuu käytettäväksi useimmille käytössä oleville materiaaleille suositelluissa käyttöolosuhteissa

Hyväksynät

Teho viruksiin, bakteereihin, itiöihin ja hiivoihin on osoitettu EU-normien mukaisesti. Tuotteella on CE IIa -sertifiointi. Pyydä tarvittaessa testitulokset edustajaltamme.

Ympäristötiedot

Tuotteessa käytetyt pinta-aktiiviset aineet ovat täysin biohajoavia EU:n pesuainedirektiivin 648/2004 mukaisesti.