

Diversey™

# Oxivir Plus Spray

## Pesevä desinfektioaine

### Kuvaus tuotteesta

Oxivir Plus Spray on käyttövalmis pesevä desinfektioaine, joka perustuu kiihdytetyn ja stabiloidun vetyperoksidin patentoituun teknologiaan. Tuote soveltuu lääkinnällisten välineiden, laitteiden ja vettä sietävien pintojen pesuun ja desinfiointiin sekä eritetahradesinfektioon.

### Ominaisuudet

- Vetyperoksidipohjainen hapan peroksygeeni. Laaja mikrobisidinen teho.

### Edut

- Käyttäjälle turvallinen ja helppo käyttää. Puhdistaa ja desinfioi samanaikaisesti vähentäen tarvittavaa työaikaa. Soveltuu laajasti erilaisten pintojen desinfiointiin ja puhdistukseen terveydenhuollon vaativissa kosteissa-, lämpimissä- ja keittiötiloissa.
- Tavanomaisiin desinfektioaineisiin verrattuna tuote on ympäristömyötäisempi. Soveltuu kevytmetallipintojen puhdistukseen (mm. alumiini). Herkkiä materiaaleja käsiteltäessä noudata laitevalmistajan ohjeita sekä testaa tuotteen soveltuvuus. Mikrokuitupyöhyksen käyttö lisää tuotteen puhdistustehoa. Kestää likarasiitusta ja emulgoi erinomaisesti ihorasvaa. Ei valkaise eikä jätä puhdistettaville pinnoille raitoja. Ehkäisee kalkkikiven muodostusta. Soveltuu tekstiilipintojen desinfiointiin ja puhdistukseen.



### Käyttöohje

**Pintadesinfektio:** Pyyhi pinta huolellisesti liukseen / vaahtoon kostutetulla siivospyyhkeellä tai suihkuta vaahto pinnoille ja kuivaa siivospyyhkeellä. Käytä likaisuusasteesta riippuen joko kostea- tai märkäpyyhintää.

**Eritetahradesinfektio:** Levitä liuos / vaahto suoraan tahraan ja pyyhi tahra pois.

**Tekstiilipintojen desinfiointi ja puhdistus:** Poista irtolika tai erite. Annostele liuos / vaahto suoraan tahralle ja poista se pehmeällä harjalla tai siivospyyhkeellä. Etene tahrasta keskusta kohti. Imeytä liuennut tahra paperiin tai siivospyyhkeeseen. Huuhtelee lopuksi pinta vedessä kostutetulla siivospyyhkeellä ja imeytä pinnalla oleva kosteus paperiin tai siivospyyhkeeseen.

CE  
0088

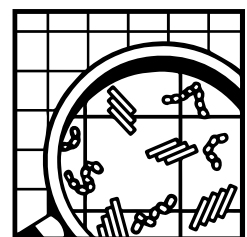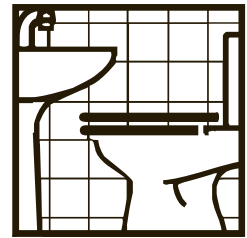

© A.I.S.E.



# Oxivir Plus Spray

## Tekniset tiedot

Ulkonäkö: Kirkas, kellertävä neste

Tuoksu: hajusteeton

pH-arvo, laimentamaton: < 2

Suhteellinen tiheys (20°C): ≈1.00

*Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.*

## Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelymiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna. Käytä suojakäsineitä. Ei saa käyttää marmoripinnoille. Älä sekoita toisten tuotteiden kanssa.

## Säilyvyys

2 vuotta

## Hyväksynät

Teho viruksiin, bakteereihin, itiöihin ja hiivoihin on osoitettu EU-normien mukaisesti. Tuotteella on CE IIa -sertifiointi. Pyydä tarvittaessa testitulokset edustajaltamme.

## Ympäristötiedot

Tuotteessa käytetyt pinta-aktiiviset aineet ovat täysin biohajoavia EU:n pesuainedirektiivin 648/2004 mukaisesti.