

# Käyttöohje

Softloo ilmatäyttöinen alusastia (REF: 10023)

## Ennen käyttöä

1. Täytä Softloo ilmalla täyteen pumpun avulla.  
(Musta ilmaventtiili, kesto n. 10-15 sekuntia.)
2. Taita reunat täytetyn alueen ulkopuolelle.
3. Sijoita imeytyslevy Softloon sisään. Softloo on nyt käyttövalmis.



## Käytön jälkeen

4. Tyhjennä Softloo ilmasta irrottamalla tarra tuotteen sivusta.
5. Irrota sininen suljinteippi reunoilta.
6. Sulje Softloo ja poista ylimääräinen ilma painelemalla tuote kasaan.
7. Softloo on valmis hävitettäväksi poltettavana sekajätteenä.



## Huomioitavaa Softloon käytössä:

- Muista aina täyttää alusastia täyteen ilmaa (kestää 270 kg painon tällöin).
- Aseta alusastia potilaan alle niin, että takamus on leveämmän pään päällä.