


Käyttöohje

Uniloo virtsakuikka (REF: 10010)

Ennen käyttöä

1. Täytä Uniloo ilmalla täyteen pumpun avulla.
(Musta ilmaventtiili, kesto vain n. 2 - 3 sek)
2. Taita reunat täytetyn alueen ulkopuolelle.
3. Taita imeystylevy kaksinkerroin ja sijoita se Uniloon sisään (tai jos virtsan määrä mitataan, vasta sen jälkeen).

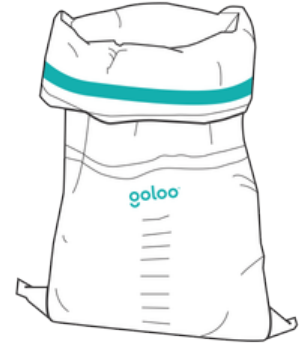

Käytön jälkeen

4. Nosta reuna takaisin pystyasentoon.
5. Irrota sininen suljinteippi kauttaaltaan.
6. Sulje Uniloo painamalla liimapinnat vastakkain.
7. Uniloo on valmis hävitettäväksi poltettavana sekajätteenä.

