


Easyloo alusastia wc-tuoleihin

(REF: 10015)

Ennen käyttöä

1. Aseta Easyloo wc-tuoliin/portatiiviin
2. Irroita siniset kiinnitysteipit neljältä sivulta (yksi kerrallaan) ja kiinnitä Easyloo tukevasti wc-tuoliin
3. Varmista, että imeytyslevy on Easyloon sisällä

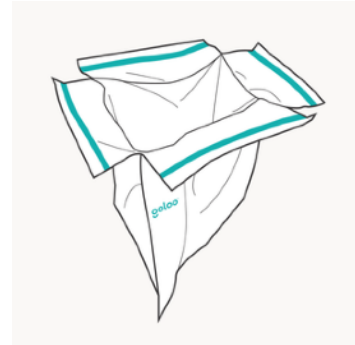

Käytön jälkeen

4. Irroita Easyloo wc-tuolista ja painele teippipinnat vastakkain
5. Sulje Easyloo vetämällä sinisistä sulkijanaruista pussi kiinni ja solmi se kiinni.
6. Easyloo valmis hävitettäväksi **polttojätteenä (erite)**

