


TRITEMP™ KOSKETUSVAPAAN KUUMEMITTARIN ASETUKSET

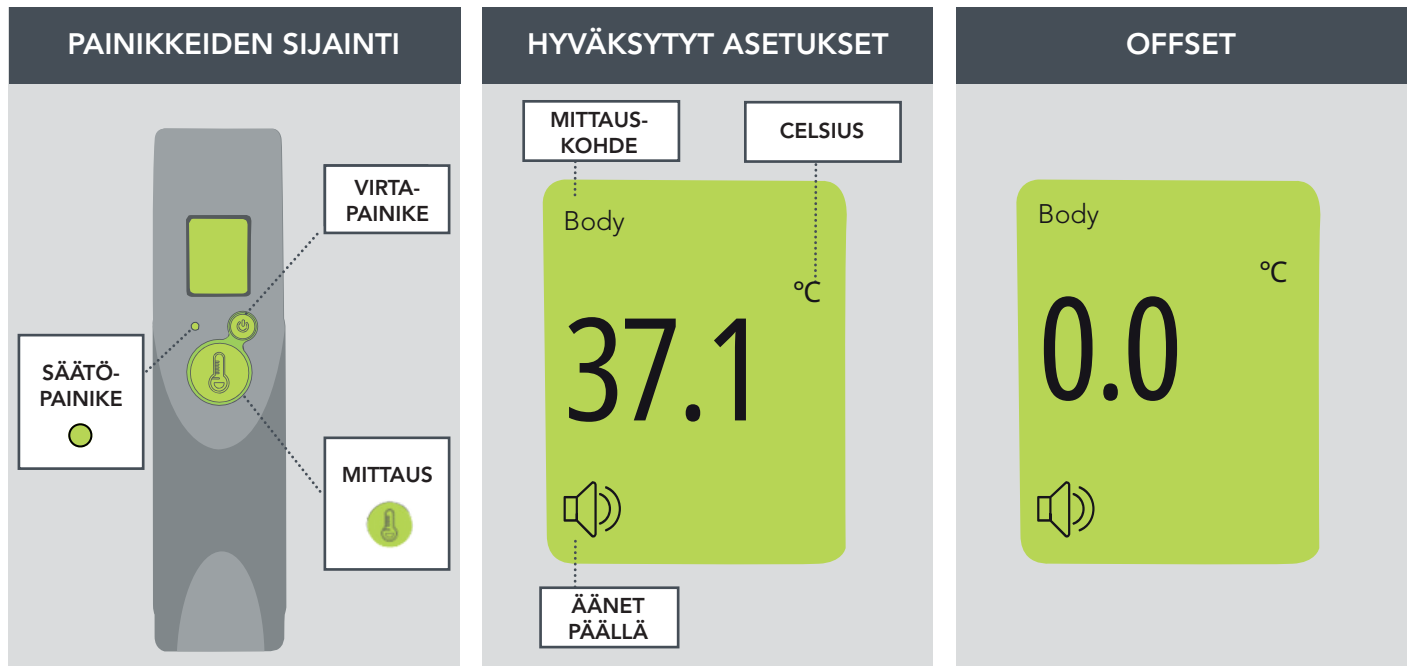

Jos ruudulla näkyvät asetukset eivät ole **hyväksytyjä asetuksia**, tee nollaus (katso alla).

TARKASTA TRITEMP™ HYVÄKSYTYT ASETUKSET

Päästäksesi asetuksiin, Paina **VIRTA**-painiketta kunnes kuulet äänimerkin ja ruutu välkhtää

TILA	ASETUKSET	PAINIKE
1	°C °F	PAINA PAINIKE PAINA PAINIKE
2	ÄÄNET POIS ÄÄNET PÄÄLLÄ	PAINA PAINIKE PAINA PAINIKE
3	OTSA (Body) PINTA (Surface)	PAINA PAINIKE PAINA PAINIKE
4	TARKASTA, ETTÄ OFFSET ON 0.0	VÄHENTÄÄKSESI, PAINA PAINIKE KASVATTAACKSESI, PAINA PAINIKE



Jos olet tyytyväinen muihin asetuksiin, paina **VIRTA**-painiketta, kunnes näyttö palaa tyhjäksi. Tämä osoittaa, että olet pois asetustilasta.

TRITEMP™ TARKASTUSLISTA

TARKASTA, ETTÄ TRITEMPIÄ
EI OLE SÄILYTETTY...

- ✓ LÄMPÖPATTERIN VIERESSÄ
- ✓ AVONAISEN IKKUNAN TAI OVEN VIERESSÄ
- ✓ TASKUSSA

ENNEN MITTAUSTA POISTA

- ✓ HATUT/PÄÄHINEET
- ✓ KUULOKKEET TMS.
- ✓ SITEET
- ✓ HIUKSET
- ✓ RASVA
- ✓ HIKI

TARKASTA, ETTÄ POTILAAN
OTSA EI OLE...


- ✓ VIILENNETTY TUULETTIMELLA
- ✓ VIILENNETTY KYLMÄHAUTEELLA
- ✓ VIILENNETTY AVOIMELLA IKKUNALLA
- ✓ POTILAAN KÄDEN ALLA



KUINKA MITTAAT KUUMEEN

TRITEMP™ **PAINA**  JA **MITTAA**  TEKNIikka

1.  Paina **VIRTA**-painiketta & **VAPAUTA**.
Tarkasta, että ruutuun syttyy valo.

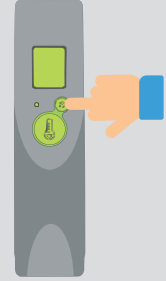

2. **SUORAAN JA KESKELTÄ.**
Etäisyys 2 sormen mittaa (3-5 cm) otsasta.
Pyyhi pois hiki tai rasva ennen mittausta.



3.  Paina **MITTAA**-painiketta & **VAPAUTA**.
Äänimerkki vahvistaa onnistuneen mittauksen.



4. LÄMPÖILOJEN TULKINTA

NORMAALI	LIEVÄ KUUME	KUUMEINEN*
Body 37.1 °C	Body 37.8 °C	Body 42.5 °C
≤ 37.3°C (99.1°F)	37.4 – 37.9°C (100-100.2°F)	> 38°C (100.4°F)

*Äänimerkki korkeasta kuumeesta



TRITEMP
NON-CONTACT THERMOMETER

CleanSide Oy | 010 423 4575 | tuotetilaukset@cleanside.fi | www.cleanside.fi

cleanside