

TRITEMP™ KOSKETUSVAPAAN KUUMEMITTARIN PIKAOHJE



PUHDISTUS JA DESINFOINTI


LAITTEEN ULKOPINNAN PUHDISTUS

- Laitteen ulkopinnan voi puhdistaa pyyhkimällä varovasti käyttäen lääkintälaitteiden puhdistukseen / desinfiointiin sopivia pyyhkeitä / liinoja.
- Varmista, ettei nestettä pääse laitteen sisään, äläkä KOSKAAN upota sitä veteen tai nesteeseen.



LINSSIN PUHDISTUS

- Puhdista mittaussanturi / linssi vain isopropyyli- tai etyylialkoholilla (esim. Dilutus) kostutetulla vanupuikolla pyyhkimällä. Vältä koskettamasta linssiin jos se ei näytä likaiselta.
- Älä käytä vettä linssin puhdistamiseen. Varmista, että laite on täysin kuiva ennen käyttöä.

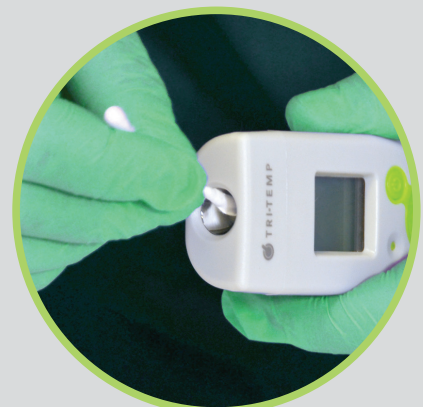

TRITEMP™ TARKASTUSLISTA

TARKASTA, ETTÄ KUUMEMITTARIA EI OLE SÄILYTETTY...

- ✓ LÄMPÖPATTERIN VIERESSÄ
- ✓ AVONAISEN IKKUNAN TAI OVEN VIERESSÄ
- ✓ TASKUSSA

ENNEN MITTAUSTA POISTA

- ✓ HATUT/PÄÄHINEET
- ✓ KUULOKKEET TMS.
- ✓ SITEET
- ✓ HIUKSET
- ✓ RASVA
- ✓ HIKI

TARKASTA, ETTÄ POTILAAN OTSA EI OLE...

- ✓ VIILENNETTY TUULETTIMELLA
- ✓ VIILENNETTY KYLMÄHAUTEELLA
- ✓ VIILENNETTY AVOIMELLA IKKUNALLA
- ✓ POTILAAN KÄDEN ALLA



KUINKA MITTAAT KUUMEEN


1.  Napsauta VIRTÄ-painiketta lyhyesti.
Tarkasta, että ruutuun syttyy valo.




2. **SUORAAN JA KESKELTÄ.**
Etäisyys 2 sormen mittaa (3-5 cm) otsasta.
Pyyhi pois hiki tai rasva ennen mittausta.



3.  Paina MITTAA-painiketta & VAPAUTA.
Äänimerkki vahvistaa onnistuneen mittauksen.

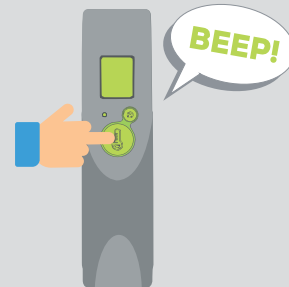

4. LÄMPÖTILOJEN TULKINTA

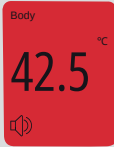NORMAALI	LIEVÄ KUUME	KUUMEINEN*
 Body 37.1 °C 	 Body 37.8 °C 	 Body 42.5 °C 
≤ 37.3°C (99.1°F)	37.4 – 37.9°C (100-100.2°F)	> 38°C (100.4°F)

*Äänimerkki korkeasta kuumeesta